



RECTO- swing®

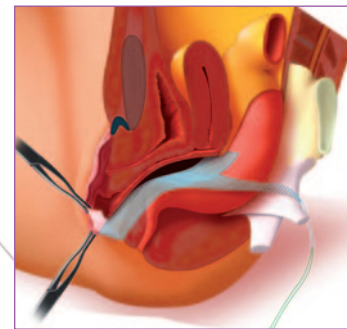

CORRECTION DE LA RECTOCÈLE "TRANSFESSIÈRE"

Implant pré-découpé en polypropylène (PP)

- Poids : 28,4 g/m²
- Porosité : 0,7 x 0,7 mm
- Epaisseur : 0,3 mm
- Résistance à la rupture : 14,9 daN / 5 cm
- Allongement : 51,3 %

	Référence	Dimensions en cm
	RS3 40140 SP	4 x 14


Service commandes :
Tél. : (33) 05 63 98 76 11 Fax : (33) 05 63 98 10 95

Service commercial :
1, rue d'Albisson 34000 Montpellier
Tél. : (33) 04 67 60 47 24 Fax : (33) 04 67 54 35 84 contact@swing-technologies.com



RECTO- swing[®]


CORRECTION DE LA RECTOCELE "TRANSFESSIÈRE"

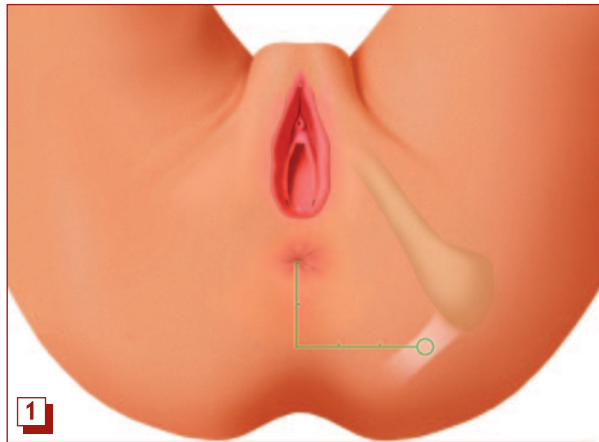


L'incision et les temps opératoires sont identiques à la rectocèle par décollement recto-vaginal, seule la fixation de la prothèse diffère comme illustré ci contre :

Point de ponction de l'aiguille transfessière :

- 2 travers de doigt horizontaux et
- 3 travers verticaux de l'anus.

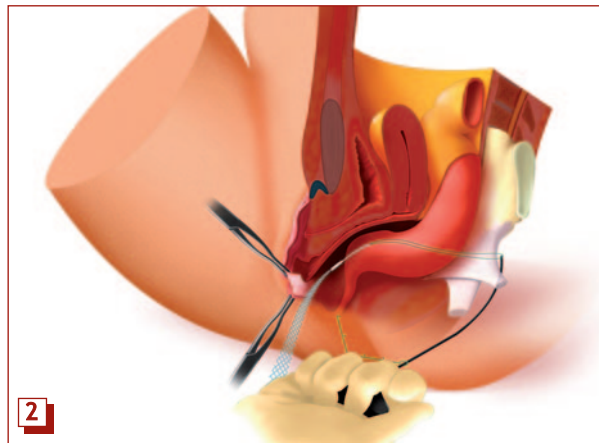

- L'aiguille transfixie le ligament sacro épineux
- Le fil guide de la prothèse est monté sur l'aiguille puis tiré en arrière.

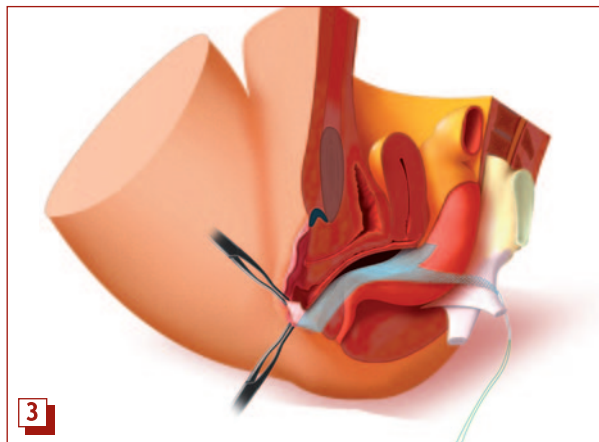

Positionnement de la prothèse «tension free» transfessière.